



Paso 01 Insertar baterías

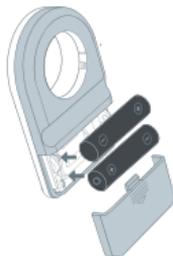

Inserte dos pilas AAA en el compartimento de la batería. Cierre el pestillo de la batería hasta que haga clic en su lugar.

Paso 02 Inserte la turbina

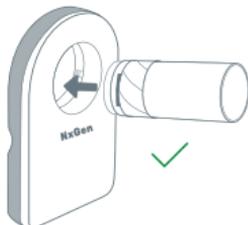

Inserte la turbina de seguridad por el frente, como se muestra en la figura.

Paso 03 Ajuste la turbina en el dispositivo



Empuje suavemente y gire la turbina en dirección de las agujas del reloj hasta que esté completamente ajustada.

Paso 04 Descargue la aplicación



Escanee el código para descargar la aplicación.




Paso 05 Configurar perfil



Toque "Continuar" para configurar el perfil.

Paso 06 Permitir acceso a la ubicación

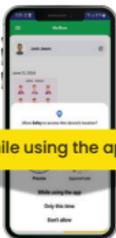

While using the app

Autorice el acceso a la ubicación

Paso 07 Iniciar prueba



Start Test

Verifique el estado de la batería, luego toque "Iniciar prueba".

Paso 08 Procedimiento de Prueba



Póngase de pie, sostenga el dispositivo y exhale con fuerza

Paso 09 Ver resultados y finalizar prueba



Finish Test

Visualice la gráfica y los resultados, luego toque "Finalizar"

Paso 10 Generar y ver informe



Share Report Print Report

Elija la prueba y toque para ver el informe

**ESCANEE AQUÍ PARA
DESCARGAR LOS
MANUALES DE USUARIO**

