



NxGen Instrucciones de Configuración del Espirómetro de Bolsillo

Paso 01 Insertar baterías

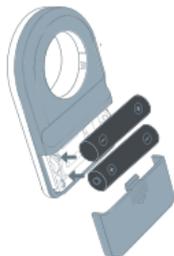

Inserte dos pilas AAA en el compartimento de la batería, Cierre el pestillo de la batería hasta que haga clic en su lugar.

Paso 02 Inserte la turbina

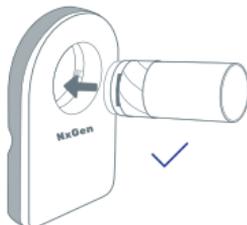

Inserte la turbina de seguridad por el frente, como se muestra en la figura.

Paso 03 Inserte la turbina en el dispositivo



Empuje suavemente y gire la turbina en dirección de las agujas del reloj hasta que esté completamente ajustada.


Paso 04 Descargue la aplicación



Escanee el código QR para descargar la aplicación.



Paso 05 Configurar perfil

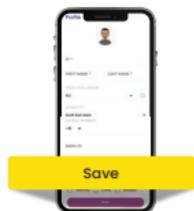


Toque "Continuar" para configurar el perfil.



Escanee Aquí Para Descargar Los Manuales De Usuario



Paso 06 Permitir acceso a la ubicación

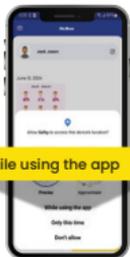

While using the app

Autorice el acceso a la ubicación


Paso 07 Conéctese al dispositivo



Connect

Toque "Conectar" para conectar el dispositivo.

Paso 08 Seleccione el tipo de prueba

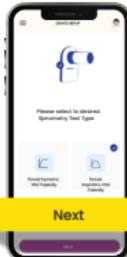

Next

Seleccione el tipo de pruebas y toque "Siguiente".

Paso 09 Iniciar prueba



Start Test

Verifique el estado de la batería, luego toque "Iniciar prueba".

Paso 10 Procedimiento de Prueba



Póngase de pie, sostenga el dispositivo, Inhale y exhale con fuerza.

Paso 11 Ver resultados y finalizar prueba



Finish Test

Visualice la gráfica y los resultados, luego toque "Finalizar".